

Pillenausdrücker

PZN 10962964 | Art. 6281

- Einfache Handhabung
- Effizientes Entnehmen von Tabletten aus Blisterverpackungen
- Auffangvorrichtung für mehrere Tabletten
- Leicht und kompakt



Der weiße Pillenausdrücker ist ein praktisches Hilfsmittel zum einfachen Entnehmen von Tabletten aus Blisterverpackungen.

Gebrauchsanweisung:

1. Halten Sie den Pillenausdrücker in einer Hand, sodass der bewegliche Teil nach oben zeigt und Ihr Daumen auf der geriffelten Stelle des Stempels liegt.
2. Positionieren Sie die Blisterverpackung zwischen dem beweglichen Stempel und der Ausdrück-Öffnung, wobei die Tabletten nach oben und die Blister-Deckfolie nach unten zeigen.
3. Drücken Sie den beweglichen Teil nach unten, sodass die Tablette durch die Ausdrücköffnung in die Auffangvorrichtung des unteren Teils fällt.
4. Halten Sie den Ausdrücker mit der geöffneten Seite nach oben, sodass Sie mehrere Tabletten im unteren Teil sammeln können. Zum Schluss neigen Sie die Öffnung langsam nach unten, um die Tabletten aus dem unteren Lager zu befördern.

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Weiß, Megadent

Produktinformationen

Abmessungen: 2,50 x 4,00 x 13,00 cm
Artikelgewicht: 0,023 kg
Gewicht mit Verpackung 0,03 kg
Inhalt/Menge: 1 St
UVP: 11,69 € inkl. MwSt



Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20