

Gebrauchsanweisung

Zum Befeuchten und Benetzen der Augen mit Natrium-Hyaluronat und Blaubeertinktur.

Herba-Vision® *Blaubeere*

mit Hyaluronat

15 ml Augentropfen

Was ist Herba-Vision® Blaubeere?

Herba-Vision® Blaubeere ist eine sterile Lösung zum Befeuchten und Benetzen der Augen mit der körpereigenen benetzenden Substanz Natrium-Hyaluronat und mit Blaubeertinktur.

Herba-Vision® Blaubeere kann auch während des Tragens von Kontaktlinsen angewendet werden.

Zusammensetzung

Natrium-Hyaluronat (0,05 %), Blaubeertinktur (0,05 %), Polyhexanid (Konservierungsmittel), EDTA, Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, Dinatriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Natriumchlorid, HPMC (0,25 %, Methocel®), gereinigtes Wasser

Herba-Vision® Blaubeere kann bei folgenden Indikationen verwendet werden:

Herba-Vision® Blaubeere Augentropfen befeuchten und erfrischen müde, trockene oder strapazierte Augen, verursacht durch das Tragen von Kontaktlinsen, Müdigkeit, den Aufenthalt in verrauchten Räumen, langandauernde Computerarbeit oder Belastung durch allgemeine Umwelteinflüsse, wie Staubpartikel, Pollen usw.

Wann sollte man Herba-Vision® Blaubeere nicht anwenden?

- Herba-Vision® Blaubeere sollte bei einer bekannten Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe nicht angewendet werden.
- Bei Patienten mit Hornhautepithelveränderungen sollte Herba-Vision® Blaubeere nicht angewendet werden.

Für wen ist Herba-Vision® Blaubeere geeignet?

Geeignet zur Anwendung bei Jugendlichen und Erwachsenen.

Schwangere, stillende Frauen und Kleinkinder sollten vor der Anwendung von Herba-Vision® Blaubeere Ihren behandelnden Arzt konsultieren.

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Herba-Vision® Blaubeere auftreten?

Folgende Nebenwirkungen sind für Herba-Vision® Blaubeere bekannt:

- Nach der Anwendung kann vorübergehend eine Beeinträchtigung der Sehschärfe eintreten. In diesem Fall sollte kein Fahrzeug gelenkt und keine Maschine bedient werden. Es empfiehlt sich zu warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Unmittelbar nach dem Tropfen können vorübergehende Symptome, z. B. leichtes Brennen der Augen auftreten.

Welche Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind zu beachten?

- Hände vor Gebrauch sorgfältig waschen und abtrocknen.
- Im Fall einer Beschädigung des Fläschchen nicht verwenden.
- Prüfen Sie vor dem ersten Öffnen, ob die Flasche unversehrt ist, um Sterilität des Inhalts zu gewährleisten.
- Um Kontamination zu vermeiden, Tropferspitze nicht berühren.
- Achten Sie darauf, das Auge nicht mit dem Tropfer zu berühren, um Verletzungen oder Augeninfektionen zu vermeiden.
- Die Öffnung des Mehrdosenbehältnisses darf nicht mit anderen Gegenständen oder Körperteilen berührt werden.
- Nach Gebrauch verschließen.
- Lösung nicht einnehmen.
- Nicht zur alleinigen Behandlung einer Augeninfektion anwenden.
- Dasselbe Mehrdosenbehältnis darf nicht von mehreren Patienten benutzt werden.
- Herba-Vision® Blaubeere ist nicht als Aufbewahrungsflüssigkeit von Kontaktlinsen geeignet.

- Bei anhaltenden oder sich verschlechternden Beschwerden einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.
- Herba-Vision® Blaubeere sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Nicht nach Überschreiten des Verfallsdatums anwenden.

Wie wird Herba-Vision® Blaubeere angewendet?

Nur für den äußerlichen Gebrauch.

- Zum Öffnen Schraubverschluss entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Brechen des Sicherheitsverschlusses drehen. Bitte entfernen Sie den Sicherheitsring nach dem erstmaligen Öffnen der Flasche.
- Flasche mit der Öffnung nach unten halten und pro Auge je 1–2 Tropfen einträufeln. Durch Lidschlag wird die Lösung verteilt und bildet eine transparente Flüssigkeitsschicht auf der Augenoberfläche.
- Verschließen Sie die Flasche nach der Anwendung mit der Verschlusskappe.

Wie oft und wie lange sollte man Herba-Vision® Blaubeere anwenden?

- Bei Bedarf 1–2 Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und durch Blinzeln verteilen.
- Wenden Sie Herba-Vision® Blaubeere nach Bedarf oder nach Anweisung des Arztes an.

Herba-Vision® Blaubeere ist für eine Daueranwendung geeignet, allerdings sollten Sie – wie bei allen Erkrankungen – bei länger anhaltenden Beschwerden einen Augenarzt um Rat fragen. Im Falle einer zusätzlichen lokalen Behandlung der Augen sollte zwischen den beiden Anwendungen ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten bestehen.

Herba-Vision® Blaubeere sollte **nach** den anderen Produkten appliziert werden.

Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

Augentropfen in 15 ml Behältnissen

Welche Hinweise zur Lagerung und Entsorgung sind zu beachten?

Bei Raumtemperatur lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Nach dem Öffnen 90 Tage haltbar.

Angaben zur Lotnummer und zum Verfallsdatum finden Sie auf der Flasche sowie auf der Faltschachtel.

Herba-Vision® Blaubeere kann im Hausmüll entsorgt werden.






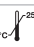

Stand der Gebrauchsinformation: Juli 2023







 OmniVision GmbH
Lindberghstraße 9
82178 Puchheim
Deutschland
Telefon: +49 89 84 07 92-30
Telefax: +49 89 84 07 92-40
www.omnivision.de
E-Mail: info@omnivision.de



Vertrieb Österreich:

OmniVision GmbH
Anton Anderer Platz 6
1210 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 270 70 70
Telefax: +43 1 270 70 70-20
www.omnivision.at
E-Mail: info@omnivision.at

	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Gebrauchsanweisung beachten
	Medizinprodukt
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Temperaturbegrenzung 5°C – 25°C
	Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen

	Fertigungslosnummer, Charge
	Verwendbar bis
	Produktidentifizierungsnummer
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Einfaches Sterilbarriersystem
	Einfaches Sterilbarriersystem mit äußerer Schutzverpackung