

Produktidentifikation

Handelsname	XyliMelts
Applikationsform	Hafttabletten
Anwendung	Oral
Einstufung	Medizinprodukt
Klassifizierung	Klasse I
Hersteller	Quest Products, LLC
Distributor	AescuBrands UG (haftungsbeschränkt)
Straße/Postfach	Im Gewerbegebiet 5
Nat.-Kenn./PLZ/Ort	DE-91093 Heßdorf
Telefon	+49 9135 422 97 90
E-Mail/ Web.	sales@aescubrands.com www.aescubrands.com



Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Technisch handelt es sich um eine mit einer Haftoberfläche versehene Tablette. Mit der Haftseite klebt die Tablette am Gaumen fest und gibt ihre Wirkstoffe ab. Hauptinhaltsstoffe sind Xylit und Calciumcarbonat, die durch Anregung des Speichelflusses Mundtrockenheit verhindern bzw. lindern.
Hauptanwendung	Die Hafttablette wird einfach an das Zahnfleisch oder die Zahnoberfläche geklebt, wo sie sich innerhalb von 4-6 Stunden rückstandsfrei auflöst. Durch die langsame Auflösung gibt die Hafttablette ihre Inhaltsstoffe kontinuierlich in den Mundraum ab und sorgt für eine konstante Befeuchtung der Schleimhäute und eine regelmäßige Anregung der Speichelproduktion.

Produktvarianten



Xylimelts Natur (ohne Minze)/40 Hafttabletten	
Packungsinhalt	2 Blister a 20 Hafttabletten, Gebrauchsinformation
Inhaltstoffe	Xylitol (550 mg), Gummiarabikum, Cellulosegummi, Magnesiumstearat, Natriumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat
Verwendbarkeit	2 Jahre
PZN	12596104
EAN	0855933000210
Artikelnummer	01AC0035
UVP	16,49 EUR (incl. 19% USt DE)

die natürliche Hafttablette
gegen Mundtrockenheit



XyliMelts Natur (ohne Minze)/110 Hafttabletten

Packungsinhalt	110 Hafttabletten, Gebrauchsinformation
Inhaltstoffe	Xylitol (550 mg), Gummiarabikum, Cellulosegummi, Magnesiumstearat, Natriumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat
Verwendbarkeit	2 Jahre
PZN	19957462
EAN	01230000169158
Artikelnummer	01AC0044
UVP	39,95 EUR (incl. 19% USt DE)



XyliMelts Milde Minze/40 Hafttabletten

Packungsinhalt	2 Blister a 20 Hafttabletten, Gebrauchsinformation
Inhaltstoffe	Xylitol (550 mg), Gummiarabikum, milde natürliche Minze, Cellulosegummi, Magnesiumstearat, Natriumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat
Verwendbarkeit	2 Jahre
PZN	12596073
EAN	0855933000777
Artikelnummer	01AC0034
UVP	16,49 EUR (incl. 19% USt DE)



XyliMelts Milde Minze Dose/110 Hafttabletten

Packungsinhalt	110 Hafttabletten, Gebrauchsinformation
Inhaltstoffe	Xylitol (550 mg), Gummiarabikum, milde natürliche Minze, Cellulosegummi, Magnesiumstearat, Natriumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat
Verwendbarkeit	2 Jahre
PZN	19723422
EAN	1230000169066
Artikelnummer	01AC0043
UVP	39,95 EUR (incl. 19% USt DE)

die natürliche Hafttablette
gegen Mundtrockenheit



XyliMelts Beeren-Mix/40 Hafttabletten

Packungsinhalt	2 Blister a 20 Hafttabletten, Gebrauchsinformation
Inhaltstoffe	Xylitol (550 mg), Gummiarabikum, Cellulosegummi, Dextrin, natürliche und künstliche Aromastoffe, Magnesiumstearat, Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat
Verwendbarkeit	2 Jahre
PZN	19708380
EAN	1230000169042
Artikelnummer	01AC0042
UVP	16,49 EUR (incl. 19% USt DE)

Ihre Vorteile

- sehr einfach zu benutzen;
- können nachts verwendet werden;
- beugen Karies vor, indem sie Säuren im Mundraum durch die Abgabe von Calciumcarbonat neutralisieren;
- erfrischen den Atem;
- sind wegen ihrer speziellen Hafttechnik für den Einsatz mit CPAP-Geräten, Zahnsparanten, Mundschutz oder Prothesen geeignet.

Bitte beachten Sie

- für Kinder unter 5 Jahren nicht empfohlen, da Erstickengefahr besteht;
- für die Anwendung im Schlaf Hafttablette an der Außenseite eines Backenzahns oder am Zahnfleisch anhaften (nicht am Gaumen, da sie sonst mit der Zunge im Schlaf versehentlich abgelöst und eingeatmet oder verschluckt werden könnte. Dies kann bis zur vollständigen Auflösung der Hafttablette Unbehagen verursachen);
- Xylitol ist giftig für bestimmte Tiere (insbesondere Hunde und Kaninchen). Außerhalb der Reichweite von Tieren aufbewahren.

Lagerung und Verwendbarkeit

- außer Reichweite von Kindern aufbewahren;
- trocken und bei unter 40°C lagern;
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen;
- nicht länger verwenden als angegeben;
- verwendbar bis: siehe Faltschachtel und / oder auf dem Blister.

Warn- und Sicherheitshinweise



Hersteller



Nicht wieder-
verwenden



Verwendbar
bis



Nicht verwenden, wenn die
Verpackung beschädigt ist, und
Gebrauchsanweisung beachten



LOT,
Chargennummer



Unsteril



Trocken
aufbewahren



Produkt in Übereinstimmung mit
den EU-Richtlinien und -Normen



Ist ein
Medizinprodukt



Eindeutige Produkt-
identifizierung