

nanobiotic®

MED + SILVER



Gebrauchsanweisung für das Medizinprodukt Nanobiotic® MED Silver Erkältung. Lesen Sie vor Gebrauch die Packungsbeilage und die Gebrauchsanweisung und wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

Nanobiotic® MED Silver Schnupfen

Das Präparat bietet antibakteriellen Schutz für Nase und Nasennebenhöhlen und unterstützt die Behandlung von Erkältungskrankheiten.

Es reinigt und regeneriert die Schleimhäute und erleichtert die Atmung.

Indikationen:

Unterstützend bei bakteriellen, mykotischen und allergischen Infektionen der Nasen- und Nebenhöhlen. Unterstützung der Behandlung und Linderung der Symptome

- leichte bakterielle Infektionen der Nase, Nasennebenhöhlen und Schleimhäute
- schwere bakterielle Infektionen der Nase, der Nasennebenhöhlen und der Schleimhäute
- gereizte Schleimhäute
- laufende Nase
- verstopfte Nase
- Atembeschwerden.

Wirkungsweise:

Nanobiotic® MED Silver Schnupfen, Nasenspray, unterstützt die Behandlung von Bakterien- und Pilzinfektionen der Nase und der Nasennebenhöhlen. Durch die innovative Kombination von Silber; Gold und aXonnite® Kupfer zeigt das Präparat höchste Wirksamkeit. Es hilft, Infektionen multidirektional und schnell zu bekämpfen.

aXonnite® Silber sorgt dank seiner Eigenschaften für die Reinigung, den antibakteriellen Schutz und die Pflege der Schleimhäute. Es hemmt die Vermehrung schädlicher Krankheitserreger, die sich auf den Schleimhäuten ansiedeln. aXonnite® Silber; Eukalyptusextrakt und Kochsalzlösung befreien die oberen Atemwege, reduzieren das Nasensekret und erleichtern die Atmung.

aXonnite® Gold und Panthenol regenerieren, stärken und befeuchten die Schleimhäute und verbessern so ihren Allgemeinzustand. aXonnite® Kupfer unterstützt die Behandlung von Pilzkrankungen der Nase und der Nasennebenhöhlen. Der zusätzliche Gehalt an Lactoferrin und Thymianextrakt hat entzündungshemmende und desinfizierende Eigenschaften. Bei prophylaktischer Anwendung verhindert es wirksam das Wiederauftreten von Infektionen, insbesondere in der Zeit des verstärkten Krankheitsverlaufs. Das Produkt enthält aXonnite®-Silber; ein natürliches Konservierungsmittel, und ist daher unbedenklich für Personen, die gegen künstliche Konservierungsmittel allergisch sind.

Anwendung:

Mehrmals täglich oder nach Anweisung des Arztes in die Nase sprühen. Vor Gebrauch gut schütteln.

Zusammensetzung:

Wasser; Glycerin, Natriumchlorid, Lactoferrin, Panthenol, Eukalyptusextrakt, Thymianextrakt, aXonnite® Silber, aXonnite® Gold, aXonnite® Kupfer; Natriumbenzoat, Kaliumsorbat.

Kontraindikationen:

Nicht bei Personen anwenden, die gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Ohne Altersbeschränkung zu verwenden.

Nebenwirkungen:

Außer einer Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen:

Nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Die Lagerbedingungen:

Bei Raumtemperatur und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die Sicherheit der in aXonnite® enthaltenen Silber-, Gold- und Kupfer wurde durch Untersuchungen des National Medicines Institute Warschau/Polen bestätigt.

aXonnite® Technology

Inhalt: 30 ml

Packungsgrößen: Nanobiotic® Silver Schnupfen als 30 ml Nasenspray.

PZN 18295556

UDI-DI: 05905143866696

Vertrieb: Nano-Tech GmbH
Mendelstraße 11, 48149 Münster
info@de-nano.tech, www.de-nano.tech

Hersteller: Nano-Tech Polska Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wał Miedzeszyński 203, 04-987 Warszawa, Poland
info@nano-tech.pl, www.nano-tech.pl

Medizinprodukt

Stand der information:
Januar 2023



Prävention und Schutz



Leichte Fälle



Schwierige Fälle

