

Anwenderinformation, bitte sorgfältig lesen!



Natriumcitrat-Lösung 3,13 % EIFELFANGO®

Sterile Lösung zu diagnostischen Zwecken

Zusammensetzung

1 ml Natriumcitrat-Lösung 3,13 % EIFELFANGO® enthält: 31,3 mg Natriumcitrat-2-Hydrat (Ph.Eur., entspricht 27,9 mg Natriumcitrat wasserfrei) in Wasser für Injektionszwecke (Ph.Eur.). Die Lösung ist steril, endotoxinfrei und enthält keine Konservierungsstoffe. Der pH-Wert liegt zwischen 6,0 und 8,0.

Anwendungsgebiete

Zur Bestimmung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit bzw. zur Aufhebung der Blutgerinnung in vitro zu sonstigen diagnostischen Zwecken.

Anwendung zur Blutsenkungsreaktion:

Zur Bestimmung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit werden 0,4 ml der Lösung mit Blut auf 2,0 ml aufgefüllt, durchgemischt und in die Blutkörperchen-Senkungsröhrchen aufgezogen.

Anwendung zu sonstigen diagnostischen Zwecken

Wird Natriumcitrat-Lösung 3,13 % EIFELFANGO® zur Verhinderung der Blutgerinnung in Zusammenhang mit einem anderen In-vitro-Diagnosticum oder Medizinprodukt eingesetzt, ist die Gebrauchsanweisung dieses Produktes zu beachten. Insbesondere muss seitens der Hersteller angegeben sein, dass Natriumcitrat-Lösung zusammen mit dem betreffenden IVD oder MP eingesetzt werden darf.

Wirkmechanismus:

Die Hemmung der Blutgerinnung durch Natriumcitrat erfolgt durch Komplexierung der Calcium-Ionen im Blut. Calcium-Ionen sind für die Blutgerinnung unentbehrlich, durch ihren Entzug kann daher die Blutgerinnung verhindert werden.

Hinweise

Nur verwenden, wenn die Lösung klar und das Behältnis unversehrt ist. Nach dem Öffnen der Behältnisse zum sofortigen Verbrauch bestimmt, angebrochene Behältnisse sind zu verwerfen. Die Lösung ist nicht zur Injektion / Infusion geeignet! Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Kleinere Mengen können ohne Umweltgefährdung über den Hausmüll entsorgt werden. Das Verfalldatum ist auf der Packung und auf den Ampullen/Flaschen aufgedruckt. Verwenden Sie Natriumcitrat-Lösung 3,13% EIFELFANGO® nicht mehr nach diesem Datum!

Hersteller

Eifelfango · Chemisch - Pharmazeutische Werke J. Graf Metternich GmbH & Co. KG
Ringener Straße 45 · 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 02641/36061 · Telefax: 02641/34056 · E-Mail: email@eifelfango.de








Stand der Information:

Juli 2004

Darreichungsformen und Packungsgrößen

Packungen mit 10, 50 und 100 Ampullen zu 1 ml
Packungen mit 10, 50 und 100 Ampullen zu 2 ml
Packungen mit 10 und 100 Ampullen zu 10 ml
Packungen mit 1, 10 und 20 Flaschen zu 100 ml



						
Verwendbar bis	Chargenbezeichnung	In-vitro-Diagnosticum	Nicht zur Wiederverwendung	Lagerung bei	Bitte Packungsbeilage lesen	Sterilisiert mit Dampf