

AUDISPRAY JUNIOR - PZN 02778181

Für die sanfte Reinigung des äusseren Gehörgangs
Für Kinder von 3-12 Jahren

Für die Ohrenhygiene
gereinigtes Meerwasser + 5% Glycerin
25 ml
Reinigt sanft die Ohren mit seinem einzigartigen Sprühaufsatz mit eingebautem Überdruckschutz
Kinder lernen spielend einfach, sich regelmässig die Ohren zu säubern mit Hilfe eines natürlichen Meerwassersprays



AUDISPRAY JUNIOR: Gereinigtes Meerwasser, angereichert mit 5% Glycerin, wirkt feuchtigkeitsspendend und lindernd, schützt und berücksichtigt den empfindlichen Gehörgang von Kindern.

AUDISPRAY JUNIOR ist eine Alternative zu Wattestäbchen.

AUDISPRAY JUNIOR weicht und löst überschüssiges Ohrenschmalz sanft auf und fördert so die natürliche Ausscheidung nach aussen, Richtung Ohrmuschel. AUDISPRAY JUNIOR enthält Glycerin mit feuchtigkeitsspendender und wohltuender Wirkung, die die Sensibilität der Kinderohren respektiert. AUDISPRAY JUNIOR enthält kein Treibgas und ist mit einem Überdruckschutz am Sprühkopf ausgestattet, der eine regelmäßige und wirksame Reinigung ermöglicht für 3 bis 12 Jahre alte Kinder.

Wie wird AUDISPRAY angewendet?

- Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren: 1 bis 2 Sprühstöße pro Ohr, zweimal wöchentlich.

1. Setzen Sie den Sprühkopf an den Gehörgang des Kindes und sprühen Sie ein- bis zweimal. Halten Sie die Sprühflasche dabei aufrecht.
2. Massieren Sie den Ohrenansatz einige Sekunden lang.
3. Das Kind sollte den Kopf zur Seite neigen, um die überschüssige Flüssigkeit auslaufen zu lassen, damit Sie diese abwischen können.
4. Spülen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser.



Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei eingesetzten Paukenröhrchen (Drainageröhrchen), Mittelohrentzündung, Trommelfelddurchbruch und im Allgemeinen bei Kindern mit einer medizinischen Vorgeschichte am Ohr (Schwindel, medizinische oder chirurgische Eingriffe ...)

AUDISPRAY ist ein mit der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG konformes Medizinprodukt.

Lesen Sie vor der Anwendung den Beipackzettel oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

E-Mail: info@diepharmex.com – www.audispray.com