



optive® UD

Zweifach wirksame, benetzende und osmoprotektive Augen-Pflegetropfen Ohne Konservierungsstoffe

Die spezifische, zweifach wirksame Zusammensetzung von OPTIVE® UD verschafft lang anhaltendes Augenwohlgefühl. OPTIVE® UD benetzt die Augenoberfläche und spendet den Zellen der Augenoberfläche Feuchtigkeit durch Wiederherstellung des natürlichen osmotischen Gleichgewichts.

Beschreibung:

OPTIVE® UD ist eine konservierungsmittelfreie, sterile Lösung in Einzeldosisbehältnissen, die Natriumcarboxymethylcellulose, Glycerol, Levocarnitin und Erythritol enthält.

OPTIVE® UD eignet sich zur Anwendung nach LASIK-Operationen (Laser In Situ Keratomileusis), zur Linderung von Augentrockenheit und Befindlichkeitsstörungen nach der Operation.

OPTIVE® UD ist zur Anwendung mit allen Arten von Kontaktlinsen geeignet.

Hinweise für die Anwendung

Nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das/die Auge(n) geben.

Vorsichtshinweise

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Lösung nicht einnehmen.
- Nicht nach Ablauf des auf dem Produkt angegebenen Verfalldatums verwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Bei Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten zwischen den Anwendungen mindestens 5 Minuten liegen.
- Verwenden Sie das Einzeldosisbehältnis nicht, wenn es beschädigt ist.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Öffnung des Einzeldosisbehältnisses nicht berühren und direkten Kontakt mit dem Auge vermeiden.
- Einzeldosisbehältnis nach einmaliger Anwendung verwerfen.

Warnhinweis

Wenn Ihre Augenprobleme weiter bestehen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenarzt.

Wie ist das Produkt erhältlich?

OPTIVE® UD Augen-Pflegetropfen sind in Einzeldosisbehältnissen mit 0,4 ml Inhalt erhältlich.



Hersteller:
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irland

STERILE A

CE 0344



72024EW15