

Protefix[®]

Haft-Creme

Classic

für Voll- und Teilprothesen

Protefix Haft-Creme Extra-Stark Classic

- 1. Nass-Haftkraft:** direkt auf die feuchte Prothese auftragbar
- 2. Starker Halt:** Extra-Stark mit Langzeit-Wirkung
- 3. Schutz:** eine wirkungsvolle Randabdichtung hilft, das Eindringen von Speiseresten unter die Prothese zu verhindern
- 4. Tragekomfort:** dank elastischer Polsterung zwischen Zahnfleisch und Prothese

Bewährte Rezeptur: ohne Zinksalz, ohne Konservierungsstoffe.
Für Voll- und Teilprothesen geeignet.

Anwendung: Prothese reinigen und **Protefix** Haft-Creme Extra-Stark **Classic** in Abständen auf die nasse Prothese auftragen. Die Prothese einsetzen und einige Sekunden fest andrücken. Nach Gebrauch bitte die Tube sorgfältig verschließen; die Öffnung dabei sauber und trocken halten.

Zusammensetzung: **Protefix** Haft-Creme Extra-Stark **Classic** enthält: Cellulose Gum (27 %), Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (26 %), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Silica, Menthol, CI 14720.

Bitte Gebrauchsanweisung beachten.




Queisser
PHARMA

GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg