

AUDIBABY 10x2ml - PZN 12529786

Für die sanfte Reinigung des äusseren Gehörgangs bei Babys und Kleinkindern von 0-3 Jahren

Für die Ohrenhygiene von 0-3 Jahren
100% gereinigtes Meerwasser, mikrobiologisch kontrolliert
10x2ml
Reinigt sanft die Ohren, praktischen Einweg-Einzeldosen




100% natürlich, 100% verträglich

AUDIBABY hält die Ohren von Babys und Kleinkindern sauber, befreit den Gehörgang von Verunreinigungen (Ohrenschmalz, Hautschuppen, Haare usw.) und ermöglicht so den natürlichen Abfluss nach außen. AUDIBABY erleichtert bei ärztlichen Untersuchungen die Sicht auf das Trommelfell, was eine Diagnose des Arztes erleichtern kann. Saubere Ohren fördern ein gutes Gehör. Bei regelmäßiger Anwendung beugt AUDIBABY der Ansammlung von Ohrenschmalz vor. AUDIBABY berücksichtigt die empfindlichen Ohren ab der Geburt. AUDIBABY wird in Einzeldosen zum Einmalgebrauch für die regelmäßige, praktische Ohrenhygiene angeboten.

Wie wird AUDIBABY angewendet?

0 bis 12 Monate: 6 bis 10 Tropfen in jedes Ohr

12 bis 36 Monate: Jeweils die Hälfte der Einzeldosis in jedes Ohr träufeln.

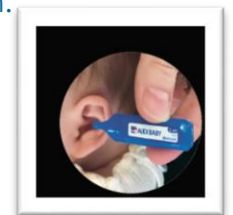

1. Lösen Sie eine Einzeldosis aus der Verpackung.
2. Erwärmen Sie die Einzeldosis einige Sekunden lang in der Handfläche, um die Anwendung für das Kind angenehmer zu gestalten.
3. Legen Sie das Baby auf die Seite. Öffnen Sie die Einzeldosis und platzieren Sie sie an der Ohröffnung. Leicht auf die Einzeldosis drücken, damit einige Tropfen austreten.
4. Massieren Sie den Ohrenansatz für optimale Wirkung 10 Sekunden lang, bevor Sie überschüssige Flüssigkeit abwischen.
5. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Ohr und entsorgen sie die Einzeldosis.

Gegenanzeigen

Nicht bei Mittelohrentzündung und im Allgemeinen bei medizinischer Vorgeschichte oder medizinischem oder chirurgischem Eingriff am Ohr oder Trommelfell anwenden.

Wenden Sie sich bei Fragen zum Gebrauch des Produkts an Ihren Arzt oder Apotheker. Überschreiten Sie nicht das auf der Verpackung angegebene Haltbarkeitsdatum.

AUDIBABY ist ein mit der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG konformes Medizinprodukt.

Lesen Sie vor der Anwendung den Beipackzettel oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

E-Mail: info@diepharmex.com – www.audibaby.com