

# Blephademodex®

**Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung. Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Sie möchten sie vielleicht noch einmal lesen.**

## ANWENDUNGSGEBIETE

BLEPHADEMODEX sind sterile, mit einer Lotion getränkte Tücher zur täglichen Augenlidhygiene bei Demodex-Befall. Nur zur Anwendung auf der Haut, direkten Kontakt mit den Augen vermeiden.

## GEEIGNET FÜR

Ausschließlich Erwachsene.

## GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von BLEPHADEMODEX sind (siehe Produktbeschreibung).

Aufgrund unzureichender Datenlage verwenden Sie BLEPHADEMODEX nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen, es sei denn, Ihr Arzt rät Ihnen dazu.

**Aufgrund unzureichender Datenlage sollte BLEPHADEMODEX nicht bei Kindern angewendet werden, es sei denn, Ihr Arzt rät Ihnen dazu.**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

BLEPHADEMODEX sind sterile, mit einer Lotion getränkte Tücher.

Die Lotion enthält: PEG-8, Polysorbat 80, Poloxamer 184, Terpinen-4-ol, PEG-6-glycerol-caprylocaprat (d. h. Macrogol-6-glycerol-caprylocaprat), Natriumhyaluronat, Dikaliumphosphat, Kaliumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser.

BLEPHADEMODEX ist frei von aggressiven Reinigungsmitteln und frei von Konservierungsmitteln. BLEPHADEMODEX verfügt durch seine natürlichen Inhaltsstoffe über einen frischen Duft, der wenige Minuten nach der Anwendung verfliegt.

Die Farbe der Tücher kann variieren. Dies ist normal und auf natürliche Pflanzenextrakte (Terpinen-4-ol, ein gereinigtes Teebaumöl-Extrakt) zurückzuführen.

## NUTZEN, LEISTUNG UND WIRKUNGSWEISE

BLEPHADEMODEX wird empfohlen:

- für die tägliche Reinigung der Augenlider bei Demodex-Befall,
- zur Symptomlinderung bei Lidinfektionen oder –entzündungen (Blepharitis) durch Demodex-Befall

*Demodex* ist der am häufigsten vorkommende, mikroskopisch kleine Hautparasit, der jedoch bei vermehrtem Vorkommen zu Irritationen wie Jucken, Brennen, entzündeten Augenlidern, Rötungen der Lidränder und Fremdkörpergefühl führen kann. Zylindrische Schuppen am Wimpernansatz sind starke Anzeichen für einen Demodex-Befall.

*Demodex* werden nicht durch die üblichen täglich angewendeten Reinigungsprodukte entfernt und bedürfen einer speziellen Behandlung.

BLEPHADEMODEX entfernt Krusten, Schuppen, Verunreinigungen und Infektionserreger an den Augenlidern und Wimpern. BLEPHADEMODEX lindert die Symptome

eines Demodex-Befalls, wie beispielsweise Jucken, Brennen, Trockenheitsgefühl und Lidrandentzündungen. Die Rötung der Augenlidränder und das Fremdkörpergefühl werden durch die Anwendung verringert. BLEPHADEMODEX enthält Natriumhyaluronat, einen natürlichen Hautbefeuchter, der empfindliche Haut beruhigt und regeneriert. BLEPHADEMODEX ist gut verträglich. Das Produkt wurde unter augenärztlicher Kontrolle getestet.

## ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

### Dosierung:

- Leichte bis mäßige Symptome: 4 Wochen lang 1-mal täglich, vorzugsweise abends, anwenden.
- Mäßige bis schwere Symptome: 4 Wochen lang 2-mal täglich, morgens und abends, anwenden.

Je nach Schwere der Symptome kann die Dosierung und Dauer der Behandlung von Ihrem Arzt angepasst werden. Wie bei anderen ähnlichen Blepharitis-Behandlungen kann die gleichzeitige Verwendung von künstlicher Tränenflüssigkeit von Ihrem Arzt empfohlen werden. Für die Verwendung von BLEPHADEMODEX ist keine besondere Schulung erforderlich.

Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, entfernen Sie diese vor der Anwendung von BLEPHADEMODEX.

Waschen Sie sich vor der Anwendung gründlich die Hände. Zum Öffnen reißen Sie die Verpackung auf (Abbildung 1) und entfalten Sie das innenliegende Tuch; verwenden Sie zum Öffnen keine Hilfsmittel.

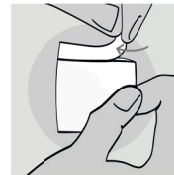


Abbildung 1: Öffnen der Verpackung

Wickeln Sie das Tuch um die Spitze Ihres Zeigefingers. Halten Sie die Augen geschlossen und legen Sie das Tuch vorsichtig auf Ihre Augenlider und den Wimpernansatz (Abbildung 2).

Massieren Sie sanft mit kleinen kreisenden Bewegungen und entfernen Sie eventuelle Krusten oder Sekrete.



Abbildung 2:  
Reinigung der Augenlider und Wimpern

**Wiederholen Sie den Vorgang mit einem neuen Tuch am anderen Auge.**

BLEPHADEMODEX ist nicht ölig und muss nach dem Gebrauch nicht abgespült werden.

Halten Sie Ihre Augen für 15 Sekunden nach der Anwendung geschlossen.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produktes, ob die Verpackung unversehrt ist: verwenden Sie das Produkt nur, wenn die Verpackung ungeöffnet ist.  
Verwenden Sie jedes Tuch nur einmal, da es sonst möglicherweise nicht gut wirkt und zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen kann.  
Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nicht verbessern, wenden Sie sich an medizinisches Fachpersonal.

## WARNHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Vermeiden Sie es, BLEPHADEMODEX in die Augen zu bekommen; Sie könnten ein brennendes Gefühl verspüren.  
Wenn dies geschieht, spülen Sie Ihre Augen mit sauberem Wasser oder Kochsalzlösung.

## NEBENWIRKUNGEN

Die folgenden Nebenwirkungen wurden berichtet: brennendes Gefühl nach der Anwendung.  
In solchen Fällen sollten Kontaktlinienträger ihre Kontaktlinsen nicht wieder einsetzen.  
Wenn Sie nach der Anwendung dieses Produkts Nebenwirkungen oder ungewöhnliche Empfindungen feststellen, wenden Sie sich bitte an medizinisches Fachpersonal und teilen Sie die Informationen dem lokalen Vertrieb, dem Hersteller oder der zuständigen Gesundheitsbehörde mit (siehe Kontaktdaten am Ende der Gebrauchsanweisung).

## AUFBEWAHRUNG UND ENTSORGUNG

Zwischen 8°C und 25°C lagern.  
Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.  
Entsorgen Sie das Tuch sofort nach der Anwendung.  
Nach Ablauf des Verfallsdatums auf der Verpackung der Tücher und dem Umkarton das Produkt nicht mehr anwenden.  
Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag eines Monats, sofern die Verpackung unbeschädigt ist und das Produkt korrekt gelagert wurde.  
Entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst gemäß der lokalen Leitlinien (die Verpackung der Tücher und die Tücher sollten im Hausmüll entsorgt werden, der Umkarton und die Packungsbeilage sind recycelbar).

## Erstellungsdatum und Version der Gebrauchsanweisung: Vers. 3 08/2020

### Hersteller:

 Laboratoires Théa  
12 rue Louis Blériot  
63017 Clermont-Ferrand  
Cedex 2 Frankreich  
www.laboratoires-thea.com  
Abschnitt « Contact us »

### Vertrieb:












Théa Pharma GmbH  
Schillerstraße 3  
10625 Berlin, Deutschland  
www.theapharma.de  
Tel. 030 / 315 18 98-0

## Gesundheitsbehörde:

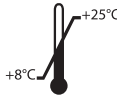Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
53175 Bonn, Deutschland  
www.bfarm.de

 0459

## BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF DER VERPACKUNG

	Hersteller
	Fertigungslosnummer, Charge
	Herstellungsdatum
	Verwendbar bis
	Temperaturbegrenzung
	Strahlen-sterilisiert
	Medizinprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht wiederverwenden
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Achtung