



ANWENDUNGSHINWEISE ZU DUREX NATURAL FEELING KONDOMEN

TRANSPARENTHE POLYISOPREN-KONDOME, GEEIGNET FÜR LATEXALLERGIKER



Jeder Mensch ist anders, aber ein Kondom sollte für alle stets bequem und sicher sein.

Bitte lies alle Hinweise vor der Verwendung aufmerksam durch, insbesondere, wenn du Kondome für Anal- oder Oralsex benutzt. Denke daran, dass keine Verhütungsmethode zu 100 % vor Schwangerschaft, HIV oder sexuell übertragbaren Krankheiten schützt. Kondome können eine Erstickengefahr darstellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

DUREX QUALITÄT

Unsere Kondome durchlaufen 5 Qualitätstests und sind dermatologisch getestet. Zudem ist jedes einzelne Kondom zu 100 % elektronisch geprüft.

ALLERGIEN

Die Durex Natural Feeling Kondome werden aus einem latexfreien Material hergestellt und sind somit für Latexallergiker geeignet.

EIN HINWEIS ZU NATURAL FEELING UND LATEXALLERGIEN

Dieses latexfreie Material ist speziell für Personen geeignet, die allergisch gegen Latex und Latexproteine sind. Wir haben Tests durchgeführt, die zeigen, dass Durex Natural Feeling Kondome nur ein geringes Potenzial für eine verzögert auftretende Überempfindlichkeit (auch „Typ IV Allergie“ und „allergische Kontaktdermatitis“ genannt) haben. Dennoch können einige Menschen, die empfindlich auf Latex reagieren, auch auf diese Kondome empfindlich reagieren. Falls du eine Reizung verspürst oder allergisch reagierst, beende die Verwendung sofort und suche einen Arzt auf.

UNSER TIPP FÜR DICH

Damit du das Kondom gleich richtig herum aus der Folie nimmst und überziehen kannst, halte die Folie beim Öffnen mit dem Durex Logo nach unten.

BEVOR IHR ANFANGT

Überprüfe vor der Verwendung das Verfallsdatum auf der Verpackung. Ist die Kondomfolie offensichtlich beschädigt, wirf das Kondom weg und benutze ein neues aus einer unbeschädigten Verpackung. Ziehe das Kondom über, bevor der Penis die andere Person berührt. Dies hilft, eine Schwangerschaft zu verhindern und reduziert die Gefahr einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten.

SO BENUTZT DU DAS KONDOM



Reiße die Verpackung an der gezackten Kante auf. Sei vorsichtig, Fingernägel oder scharfe Gegenstände können das Kondom beschädigen.



Halte das Kondom mit dem aufgerollten Rand nach außen, drücke das Reservoir zusammen und setze das Kondom auf die Spitze des erigierten Penis auf.



Rolle das Kondom vollständig bis zum Schaft ab. Wenn sich das Kondom nicht abrollen lässt, ist es möglicherweise verkehrt herum aufgesetzt – entsorge dieses und verwende ein neues. Prüfe, ob es abrutscht oder zu fest sitzt, da dies das Kondom beschädigen kann. Das Kondom so bald wie möglich nach der Ejakulation abstreifen. Halte das Kondom am Schaft fest, bevor der Penis herausgezogen wird.



Wirf die Folie und das benutzte Kondom in einen Mülleimer, nicht ins WC.

WANN BERATUNG NOTWENDIG IST

Sprich mit einem Arzt oder Apotheker, wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Latexallergie besteht, nach Verwendung Reizungen oder Unwohlsein auftreten, oder du Medikamente verwendest, die lokal auf Penis oder Vagina aufgetragen werden. Wenn ein Kondom beim Sex ausläuft oder platzt, konsultiere so bald wie möglich (spätestens innerhalb von 72 Stunden) einen Arzt oder Apotheker.

Schwerwiegende Vorfälle können Reckitt und der zuständigen Behörde vor Ort gemeldet werden, die dann weitere Ratschläge erteilen.

WARNHINWEISE

Benutze nur Gleitmittel, die für die Verwendung mit Kondomen empfohlen werden. Gleitmittel auf Ölbasis (Vaseline, Babyöl und einige Vaginalzäpfchen) sowie einige Medikamente zur äußeren Anwendung, die auf Penis oder Vagina aufgetragen werden, können Kondome beschädigen.

STOPPE DIE BENUTZUNG: Wenn du während der Benutzung Unwohlsein oder Reizungen verspürst.

Benutze jedes Kondom nur einmal. Eine Wiederverwendung erhöht das Risiko einer Beschädigung oder Infektion. Kondome können eine Erstickungsgefahr darstellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn du das Kondom zunächst für Oralsex benutzt, verwende für jede folgende Sexpraktik ein neues Kondom. Benutze für Analsex zusätzliches Gleitgel auf der Außenseite des Kondoms (kein Durex Prickelnd).

LAGERHINWEISE

Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Medizinprodukt in der EU, von SGS nach MDD 93/42/EEC zertifiziert.
Anwendungshinweise beachten.



Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, Darwinstrasse 2-4, 69115 Heidelberg

Für mehr Infos besuche www.durex.de



@durex.de

ERKLÄRUNG DER HINWEISSYMBOLS AUF DER VERPACKUNG

	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
	Medizinprodukt		Trocken lagern
	Bitte Anwendungshinweise beachten		Frei von Naturkautschuklatex
	Achtung		Hersteller: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, HU8 7DS, UK
	Verfallsdatum. Produkt nicht verwenden, wenn dieses Datum überschritten wurde		Chargennummer
	Nicht wiederverwenden		